

þurrkum.

VARÚÐARREGLUR FYRIR NOTKUN

Gakktu úr skugga um að þakningin sé heil fyrir notkun: notaðu aðeins ef þokinn er óþnaður.

Notið hverja þurrku aðeins einu sinni, því annars geta hreinsunarhrif minnkað og aukin sýkingarhætta átt sér stað.

Haftu samband við lækinn ef einkennin versna eða lagast ekki.

VARNADARORÐ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Förðist að BLEPHACLEAN komist í snertingu við augu, því það getur valdið sviðatilfinningu. Ef það gerist skaltu skola með sæfðu vatni eða saltvatnslausn.

AUKAVERKANIR

Greint hefur verið frá eftirfarandi aukaverkunum við notkun BLEPHACLEAN: sviðatilfinning og kláði í nokkrar mínútur eftir notkun, roði eða þroti á augnlokum, roði í augum, ofnæmisviðbrögð.

Í þeim tilvikum á ekki að setja augnlinsur aftur í augu séu þær notaðar.

Ef þú finnur fyrir einhverjum aukaverkunum eða óvenulegri tilfinningu eftir notkun á þessari vöru haftu þá samband við lækni, og tilkynntu um slíkt til dreifingaránda, framleiðanda eða Lyfjastofnunar (sjá upplýsingar um tengiliði aftast í þessum leiðbeiningum).

GEYMSLUSKILYRÐI OG FÖRGUN

Geymið við 8°C til 25°C.

Haldið vörnunni frá beinu sólarljósi og raka.

Hendi þurrkunum strax eftir notkun.

Notið ekki eftir fymringardagsetningu sem er greinilega skráð á pakningu og ytri umbúðir.

Fymringardagsetningin vísar til síðasta dags mánaðarins sem þar kemur fram svo lengi sem þakningin er óskemmd og hefur verið geymd við rétt skilyrði. Fargið á ábyrgan hátt og í samræmi við staðbundnar leiðbeiningar (þokanum skal henda með heimilissorpi en ytri askjan og fylgiseðillinn eru endurvinnanleg).

Dagsetning og útgáfunúmer fylgiseðilsins:

Útg. 5 08/2022

Framleiðandi:

Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frakkland

www.laboratoires-thea.com

kafli « Contact us »

Dreifingaráðili:

Provision ehf. Heildverslun,
Grandagarði 13, 101 Reykjavík

Heilbrigðisfyrivöld:

Lyfjastofnun, Vínlandsleið 14,
113 Reykjavík

Tel: 520 2100, e-mail: ima@ima.is – www.ima.is

CE 0459

NO

Blephaclean®

Þetta produkt er et medisinsk utstyr.

Les bruksanvisningin før bruk.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

INDIKASJONER

BLEPHACLEAN er til daglig rengjøring av øyelokkene. Kun til bruk på huden, skal ikke brukes direkte i øynene.

EGNET FOR

- Voksne
- Barn eldre enn 3 måneder: Foreldre eller omsorgspersoner skal påføre produktet.

KONTRAINDIKASJONER

Bruk ikke BLEPHACLEAN hvis du er allergisk overfor noen av innholdsstoffene (se Utstyrsbeskrivelse).

I mangl av tilstrekkelige data skal BLEPHACLEAN ikke brukes dersom du er gravid eller ammer, med mindre legen har anbefalt det.

UTSTYRSBESKRIVELSE

BLEPHACLEAN er en steril våtserviett, satt inn med en smørende og behandelnde væske til daglig rengjøring av øyelokkene.

Væskan inneholder: Kapryloylglysin, natriumhyaluronat, PEG-8, poloksamer 184, polysorbit 20, propylenglykol, hydrokolyektakt (propylenglykol, ekstrakt av *Centella asiatica* og vann), sebunregulerende kompleks uten konserveringsmiddel (propylenglykol, ekstrakt av *Iris florentina*-rot, sinkulfat, alkohol, natriumhydroksid eller saltsyre og vann), PEG-6-kapryl/kapratglysinerider (dvs. makrogol 6-glyserolkaprylokapat), dikaliumfosfat, natriumhydroksid, kaliumdihydrogenfosfat, rensat vann. Fargen på våtservietten kan variere. Dette skyldes naturlige planteuttrekk og er normalt.

FORDELE, EFFEKT OG VIRKNINGSMEKANISME

BLEPHACLEAN er en steril våtserviett til daglig rengjøring av øyelokkene, spesielt:

- dersom du har sensitiv hud, øyelokk eller øyne
- dersom du skal fjerne støv, pollen og puss fra øyelokkene. Dette kan være en del av din øyepleie når du har allergi eller infeksjon i øynene
- dersom du har betennelse eller infeksjon i øyelokkene, som blefaritt (øyelokkinflammasjon), dårlig fungerende Meibomske kjertler (øyelokkskjertlene), sti eller chalazion (kul på øyelokket). Disse tilstandene kan medføre symptomer på tørre øyne, som kløe, følelse av å ha sand i øynene, såre og/eller røde øyne
- dersom du må rengjøre øyelokkene før en øyeeoperasjon, som terapeutisk injeksjon i øyet (intravitreøs injeksjon), laseroperasjon (LASIK eller PRK) og kataraktoperasjon (grå stær). Siden det tolereres godt kan BLEPHACLEAN også brukes etter en operasjon, basert på råd fra lege eller øyeelege.

BLEPHACLEAN rengjør og fjerner støv, pollen og puss fra øyelokkene. BLEPHACLEAN ivaretar huden rundt øynene og dens naturlige bakterieflora.

Produktet har blitt testet under oftalmologisk kontroll.

GENERELLE ANBEFALINGER FOR BRUK

DOSERING:

Før en øyeeoperasjon skal det brukes **to ganger daglig** i 5 dager eller slik legen, optikeren eller apoteket har fortalt deg.

I de andre tilfellene skal det brukes **to ganger daglig** morgen og kveld i 3 uker og deretter én gang daglig i 3 måneder eller slik legen eller apoteket har fortalt deg. Noen øyelokkstilstander er kroniske, og det kan være nødvendig at du fortsetter med rengjøring av øyelokkene i lang tid.

BLEPHACLEAN er enkel å bruke.

Dersom du bruker kontaktlinser: du må ta ut linsene før bruk av BLEPHACLEAN.

Vask hendene godt før bruk av våtservietten.

Riv posen på tvers for å åpne (figur 1), og brett ut våtservietten. Bruk ikke verktøy for å åpne posen.



Figur 1: Åpning av posen

Brett våtservietten rundt tuppen av pekefingeren.

Hold øyet lukket, plasser våtservietten forsiktig på øyelokket og innerst på øyevippene (figur 2).

Masser forsiktig med små sirkelbevegelser, for å fjerne eventuelle skorper, puss eller sminke.



Figur 2: Rengjøring av øyelokk og øyevipper

Stå foran et speil, trekk nedre øyelokk forsiktig nedover med den andre hånden. Gni fingeren med våtservietten langs kanten på nedre øyelokk (figur 3).



Figur 3: Rengjøring av øyelokkskanten

Gjenta på det andre øyet med en ny våtserviett.

Det er ikke nødvendig å skylle av etter bruk av BLEPHACLEAN våtservietter.

FORSIKTIGHETSREGLER

Sjekk at pakningen er intakt før første gangs bruk: bruk kun uåpnede poser.

Våtservietten skal ikke brukes mer enn én gang, da dette kan medføre mindre effekt og øke infeksjonsfaren. Du må kontakte helsepersonell dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.

ADVARSLER

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå å få BLEPHACLEAN i øyet, ellers kan du merke en sviende følelse. Skyll med sterilt vann eller saltvannspopløsning hvis dette skjer.

BIVIRKNINGER

Følgende bivirkninger er rapportert med BLEPHACLEAN: svie eller kløe i noen minutter etter bruk, rødhet eller hevelse i øyelokkene, røde øyne, allergiske reaksjoner. I slike tilfeller bør kontaktlinsebrukere ikke sette kontaktlinsene inn igjen.

Dersom du merker bivirkninger eller uvanlige fornemmelser etter bruk av dette produktet, kontakt helsepersonell og meld opplysningene til den lokale distributøren, til tilvirkeren eller til din lokale helsemyndighet (se kontakter på slutten av pakningsvedlegget).

OPPBEVARINGS- OG AVHENDINGSBETINGELSER

Oppbevares ved 8 °C til 25 °C.

Skal ikke utsettes for direkte sollys eller fuktighet.

Kast våtservietten umiddelbart etter bruk.

Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på posen og ytteresken.

Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden så lenge pakningen er intakt og har blitt oppbevart riktig. Kast produktet på forsvarlig vis i overensstemmelse med lokale krav (posen skal kastes sammen med husholdningsavfall, ytteresken og pakningsvedlegget kan gjenvinnes).

Pakningsvedleggets utgivelsesdato og versjonsnummer: Ver. 5 08/2022

Tilvirker:

Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankrike

www.laboratoires-thea.com

avsnitt « Contact us »

Distributør: Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363

Örebro, Sverige

Helsemyndigheter: Statens legemiddelverk,

Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo

Tel: +47 22 89 77 00

e-post: meddev-no@noma.no - www.legemiddelverket.no

CE 0459

PIKTOGRAMMER PÅ PAKNINGEN
SKYRINGER Å MYNDTÅKNUMUM Å UMBÜDUNUM
BETYDNINGEN AV PIKTOGRAMMENE PÅ PAKNINGEN

	Fremstiller Framleiðandi Tilvirker
	Batchnummer Lotunúmer Batchnummer
	Fremstillingsdato Framleiðsludagsetning Tilvirkningsdato
	Dato for sidste anvendelse Notist fyrir Brukes innen-dato
	Temperaturgrenser Hitastigsmörk Temperaturgrenser
	Steriliseret ved bestråling Dauðhreinsað með smítgátarferlum Steriliseret ved bestråling
	Medicinsk utstyr Lækningatæki Medisinsk utstyr
	Se bruksanvisning Lesið leiðbeiningarnar fyrir notkun Les bruksanvisningen
	Engangsbrug Einnota Engangsbrug
	Må ikke anvendes hvis emballagen er beskadiget Notist ekki ef þakningin er skemmd Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet
	Advarsel Varúð Advarsel
	Produktet må ikke utsættes for direkte sollys Geymið fjarni sólarljósi Beskyttes mot sollys
	Opbevares tørt Geymið á þurrum stað Holdes tørr
	Katalognummer Vörulistanúmer Delenummer
	Unik enhedsidentifikator Einkvæmt auðkenni tækis Unik enhetsidentifikator

Théa

N1179LG20L25/0822 - XXXXXX