

# Blephadmodex®

Dette produktet er et medisinsk utstyr.  
Les bruksanvisningen før bruk.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

## INDIKASJONER

BLEPHADEMODEX er en steril våtserviett, satt inn med en smørende og behandlende væske til daglig rengjøring av øyelokkene ved *Demodex*-infeksjon.

Kun til bruk på huden, skal ikke brukes direkte i øynene.

## EGNET FOR

Kun voksne.

## KONTRAINDIKASJONER

Bruk ikke BLEPHADEMODEX hvis du er allergisk overfor noen av innholdstoffene (se Utstyrsbeskrivelse).

I mangel av tilstrekkelige data skal BLEPHADEMODEX ikke brukes dersom du er gravid eller ammer, med mindre legen har anbefalt det.

I mangel av tilstrekkelige data skal BLEPHADEMODEX ikke brukes til barn, med mindre legen har anbefalt det.

## UTSTYRSBESKRIVELSE

BLEPHADEMODEX er en steril våtserviett, satt inn med en smørende og behandlende væske.

Væsken inneholder: PEG-8, polysorbat 80, poloksamer 184, terpinen-4-ol, PEG-6-kapryl/kapratglyserider (makrogol 6-glyserolkaprylokapat), natriumhyaluronat, dikaliumfosfat, kaliumdihydrogenfosfat, renset vann. BLEPHADEMODEX inneholder ikke konserveringsmiddel eller sterk såpe. BLEPHADEMODEX har en karakteristisk duft fra naturlige innholdstoffer. Dette forsvinner i løpet av noen få minutter etter påføring. Fargen på våtservietten kan variere. Dette skyldes naturlige planteuttrekk (terpinen-4-ol, et renset uttrekk fra tetreolje) og er normalt.

## FORDELER, EFFEKT OG VIRKNINGSMEKANISME

BLEPHADEMODEX anbefales:

- til daglig rengjøring av øyelokkene ved *Demodex*-infeksjon
- til symptomlindring ved øyelokksinfeksjon eller -betennelse (blefaritt) forårsaket av *Demodex*.

*Demodex* er den vanligste mikroskopiske hudparasitten, men hvis det blir for mange midl kan det oppstå irriterende symptomer som kløe, svie, såre øyelokk, rødhet i øyelokkskanten og følelse av fremmedlegemer. Sylindreformet flass som sitter igjen innerst på øyevippene, er et klart tegn på *Demodex*-infeksjon. *Demodex* fjernes ikke med vanlige renseprodukter til daglig bruk, men krever spesialtilpassede produkter.

BLEPHADEMODEX renser bort skorper, flass, urenheter og smittestoffer på øyelokk og øyevipper. BLEPHADEMODEX bedrer symptomer knyttet til *Demodex*-infeksjon, som kløe, svie, tørrhet og betennelse i øyelokkskanten. Rødheten på øyelokket og følelsen av fremmedlegemer reduseres.

Den inneholder natriumhyaluronat, et naturlig bløtgjørende stoff, som roer ned og regenererer sensitiv hud.

BLEPHADEMODEX tolereres godt.

Produktet har blitt testet under oftalmologisk kontroll.

## GENERELLE ANBEFALINGER FOR BRUK

### Dosering:

- Milde til moderate symptomer: Brukes én gang daglig, om kvelden, i 4 uker.
- Moderate til kraftige symptomer: Brukes to ganger daglig, morgen og kveld, i 4 uker.

Helsepersonell kan tilpasse doseringen og behandlingsvarigheten ut fra symptomenes alvorlighetsgrad.

Som ved bruk av andre tilsvarende blefarittbehandlinger, kan helsepersonell anbefale samtidig bruk av kunstig tårevæske. BLEPHADEMODEX er enkel å bruke.

Dersom du bruker kontaktlinser: du må ta ut linsene før bruk av BLEPHADEMODEX.

Vask hendene godt før bruk av våtserviettene.

Riv posen på tvers for å åpne (figur 1), og brett ut våtservietten. Bruk ikke verktøy for å åpne posen.



Figur 1: Åpning av posen.

Brett våtservietten rundt tuppen av pekefingeren. Hold øyet lukket, plasser våtservietten forsiktig på øyelokket og innerst på øyevippene (figur 2). Masser forsiktig med små sirkelbevegelser, for å fjerne eventuelle skorper eller puss.



Figur 2: Rengjøring av øyelokk og øyevipper.

## Gjenta på det andre øyet med en ny våtserviett.

BLEPHADEMODEX inneholder ikke olje og skal ikke skylles av etter bruk.

Hold øyet lukket i 15 sekunder etter påføring.

## FORSIKTIGHETSREGLER

Sjekk at pakningen er intakt før første gangs bruk: bruk kun uåpnede poser.

Våtservietten skal ikke brukes mer enn én gang, da dette kan medføre mindre effekt og øke infeksjonsfaren.

Du må kontakte helsepersonell dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.

## ADVARSLER

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå å få BLEPHADEMODEX i øyet, ellers kan du merke en sviende følelse. Skyll med sterilt vann eller saltvannsuppløsning hvis dette skjer.

## BIVIRKNINGER

Følgende bivirkninger er rapportert med BLEPHADEMODEX: svie eller kløe i noen minutter etter bruk, røde eller hovne øyelokk, rødt øyeeple og allergiske reaksjoner.

I slike tilfeller bør kontaktlinsebrukere ikke sette kontaktlinsene inn igjen.

Dersom du merker bivirkninger eller uvanlige fornemmelser etter bruk av dette produktet, kontakt helsepersonell og meld opplysningene til den lokale distributøren, til tilvirkeren eller til din lokale helsemyndighet (se kontakter på slutten av pakningsvedlegget).

## OPPBEVARINGS- OG

## AVHENDINGSBETINGELSER

Oppbevares ved 8 °C til 25 °C.

Skal ikke utsettes for direkte sollys eller fuktighet.

Kast våtservietten umiddelbart etter bruk.

Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på posen og ytteresken.

Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden så lenge pakningen er intakt og har blitt

oppbevart riktig.

Kast produktet på forsvarlig vis i overensstemmelse med lokale krav (posen og våtservietten skal kastes sammen med husholdningsavfall, ytteresken og pakningsvedlegget kan gjenvinnes).

Pakningsvedleggets utgivelsesdato og versjonsnummer: Ver. 5 07/2022

## Tilvirker:

Laboratoires Théa  
12 rue Louis Blériot  
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2,

Frankrike

www.laboratoires-thea.com

Avsnitt « Contact us »

## Distributør:

Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige

## Helsemyndighet:

Direktoratet for medisinske produkter,  
Postboks 240 Skøyen,  
0213 Oslo

Tel: +47 22 89 77 00

e-post: msod@dmp.no

www.dmp.no

CE 0459

## BETYDNINGEN AV PIKTOGRAMMENE PÅ PAKNINGEN

	Tilvirker
	Tilvirkningsdato
	Temperaturgrenser
	Medisinsk utstyr
	Engangsbruk
	Batchnummer
	Brukes innen-dato
	Sterilisert ved bestråling
	Les bruksanvisningen
	Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet
	Advarsel
	Delenummer
	Beskyttes mot sollys
	Holdes tørr